


## Einstellungsparameter / Adjustment parameters DentalDesigner™

### ZENOTEC T1

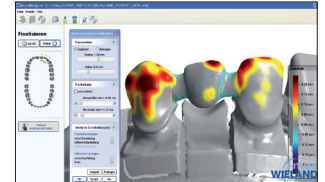

Material ZENOTEC	Zr	Pro FIX	PMMA cast	Wax
Passungsparameter/ Cement Gap	0,01	0,01	0,01	0,01
Zementspalt/ Extra cement gap	0,04	0,04	0,04	0,04
Passungsp.-Höhe/ Distance to preparation line	1,00	1,00	1,00	1,00
Übergangsbreite/ Smooth distance	0,20	0,20	0,20	0,20
Wandstärke/ Wall thickness	0,60	0,60	0,60	0,60
Randstärke/ Preparation line offset	0,25	0,15	0,15	0,15
Randwinkel/ Offset angle	90,00	90,00	90,00	90,00
Schenkellänge/ Extension offset	0,20	0,15	0,15	0,15

### 2100/4030/4820

Material ZENOTEC	Zr	Al	Pro FIX	PMMA cast	Wax
Passungsparameter/ Cement Gap	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zementspalt/ Extra cement gap	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Passungsp.-Höhe/ Distance to preparation line	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Übergangsbreite/ Smooth distance	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Wandstärke/ Wall thickness	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Randstärke/ Preparation line offset	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20
Randwinkel/ Offset angle	65,00	65,00	90,00	90,00	90,00
Schenkellänge/ Extension offset	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15