

Wichtige Produktinformation



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie heute über eine geänderte Verfahrensanweisung informieren:

Neueste Erkenntnisse haben ergeben, dass schonendes Sandstrahlen von Zirkonoxidgerüsten von Vorteil ist. Hierdurch wird die Gerüstoberfläche gereinigt und eine bessere Benetzung durch die Verblendkeramik gewährleistet. Deshalb empfehlen wir nach dem Ausarbeiten, das Zirkonoxidgerüst mit ca. 110 µm Aluminiumoxid Strahlmittel bei ca. 1 bar abzustrahlen.

Eine zusätzliche Wärmebehandlung (Reinigungsbrand) des dichtgesinterten Zirkonoxidgerüstes bringt keinen weiteren Vorteil.

Diese Gerüstbearbeitung ist für alle Zirkonoxidmaterialien des **ZENO®** Tec Systems gültig.

Freundliche Grüße

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Brommer'.

Reinhold Brommer
Leiter Produktmanagement

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Meier'.

Saskia Meier
Produktmanagement CAD/CAM **ZENO®**